

10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTR.AR, INJETOR LATERAL E CON. LUER ROTATIVO
ANVISA Nº80163570006

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp que se adaptem em conectores de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas, modelo tri-facetado.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
6. Tubo em PVC atóxico com 150 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
7. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
8. Injetor lateral formato em y, com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções durante procedimento.
9. Conector luer lock rotativo, conforme NBR ISO 594-1 e 2/2003, montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
10. Tampa protetora para ao conector luer rotativo.
11. FREE LÁTEX

ROTULAGEM:Modelo de Rótulo

EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84.990-000 ARAPODI - PR CNPJ: 05.139.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: (43) 3512-2800 sac@medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTE PRODUTO É INDICADO SOMENTE PARA INFUSÃO POR GRAVIDADE. ESTE PRODUTO É TOTALMENTE ESTERILIZADO E ENDOSTERILIZADO. PRODUTO DESTINADO SOMENTE PARA USO ÚNICO. FABRICADO EM PVC COM 100MM. 40GOTAS. ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 8064-4:2011. 40 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIGADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1,00 ML OU MASSA DE 1,00 G.	INSTRUÇÕES DE USO 1 - ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR. 2 - FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE REQUERESSE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA. 3 - COMPATIVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6%. 4 - ABRIRE A EMBALAGEM DE FORMA ASEPTICA. 5 - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO. 6 - RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO. 7 - MODELOS COM INJETOR LATERAL, PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO. 8 - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES INTENDEDORES CONSTITUÍREM O PRODUTO. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO. EQUIPO PRODUZIDO EM PVC COM COP NÃO DEVER SER UTILIZADO COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO INALCÓLICOS.	VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO, E TEMPERATURA AMBIENTE.	
MODELOS COMERCIALIZADOS 1032002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP. 1032102 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SLIP. 1032202 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP. 10317021 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP. 10317002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, FILTRO DE PARTÍCULAS, ENTRADA DE AR, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER ROTATIVO. 1031802 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROTATIVO. 1031902 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL, INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP.	
      Validade 4 anos após a data de fabricação	


COD: 10317002 – EQUIPO MICRO FLEX. FILTRO PART., ENT. AR, INJ. LAT., CONEC. LUER

LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00

ANVISA Nº 80163570006



7 898487 863156

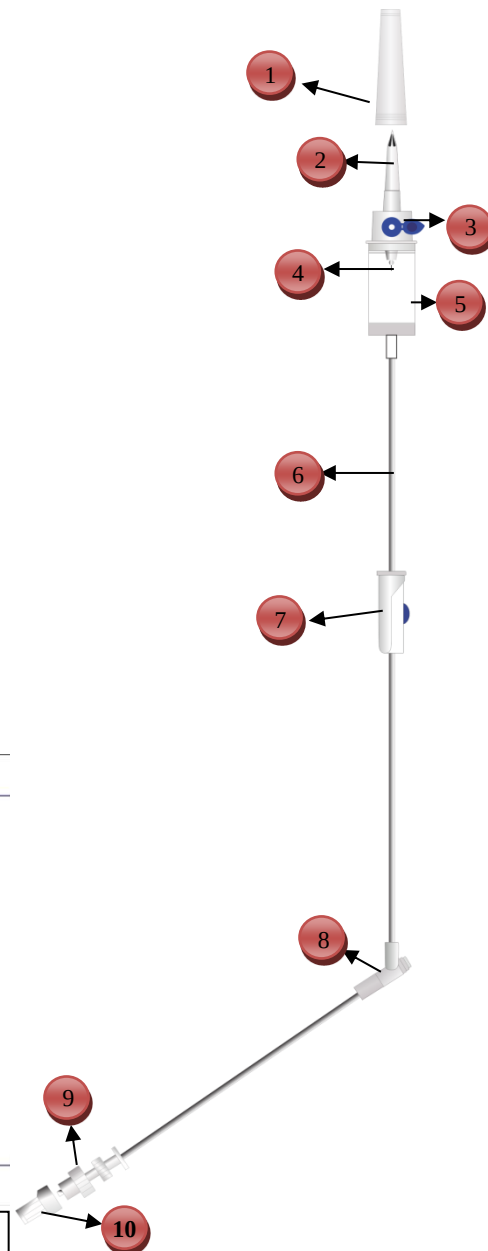

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
08/2016	01	Joelma C. Brizola	Atualização
03/2017	02	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
01/2018	03	Joelma C. Brizola	Revisão embalagem
08/2018	04	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
10/2019	05	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".
02/2021	06	Rogério S. Soares	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Milena Costa Rivera" para "Rogério S. Soares". Inclusão da especificação ponta perfurante tri-facetada Alteração do perfurador de frasco imagem 2.