

 PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO EQUIPO DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL IU 5.033	Emissão: 01/2024	 PRODUTOS PARA SAÚDE
---	-----------------	--	---------------------	---

Especificação Técnica:

Poli cloreto de Vinila (PVC).

Comprimento: 180 cm

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto Uso Único. Proibido Reprocessar.

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

A escolha e as orientações quanto ao uso dos equipos devem ser feitas pelo médico;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; a embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada e úmida. O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso médico hospitalar, tem a finalidade de monitorar a pressão venosa central em pacientes em estado crítico o em UTI.

Modo de Uso:

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio.

Verificar se as tampas protetoras estão perfeitamente encaixadas, garantindo assim a integridade da esterilização após aberto a embalagem.

Verificar se as conexões e componentes do produto suportam as condições normais de uso.

Retirar a tampa do perfurador e conectar o equipo ao frasco de solução, fechá-lo com o controlador de fluxo.

Verificar se o encaixe do perfurador e do frasco estão seguros, e não apresentam vazamentos.

Verificar se o controlador de fluxo permite uma regulagem do fluxo de gotejamento da solução entre zero e o máximo.

Realizar a conexão com o cateter de pressão venosa central.

Proceder à medição da P.V.C.

Após o uso, descartar o produto de acordo com a legislação vigente.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel. (43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570044.

MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão Nº02	INSTRUÇÃO DE USO EQUIPO DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL IU 5.033	Emissão: 01/2024	MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	---	-----------------------------	--

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2019	00	Milena C. Rivera	Elaboração
02/2022	01	Gessica Dias Correia	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Rogerio S. Soares” para “Gessica Dias Correia”.
01/2024	02	Rozilda R. Oliveira	Revisão

Atualizado por Rozilda Rodrigues de Oliveira – Aprovado por Regiane Gavlak – Data da
Aprovação 01/2024