

BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTÁVEL**Especificação Técnica:**

Polietileno virgem especial

Fita adesiva antialérgica

Capacidade: 250 ml

Orifício circular de abertura: 30; 50 e 63 mm

Dimensões: 12 x 24 cm

Produto Não Estéril

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto não estéril e de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Verificar o prazo de validade do produto, antes da sua utilização, não utilizar se o prazo estiver expirado;

Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

Para coleta de material fecal em pacientes colostomizados, em período pós-cirúrgico ou com antecedente cirúrgico de derivação intestinal.

Modo de Uso:

A escolha em quanto ao uso das bolsas deve ser feita pelo médico.

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica.

Fixe a bolsa ao corpo do paciente com a fita adesiva antialérgica.

Introduzir na bolsa a sonda de coleta do material.

Terminada a coleta, retirar a sonda e substituir por uma nova.

Após uso, descartar em lugar apropriado.

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.

Produto não estéril e de uso único.

Descartar após uso.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570013.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração