

SISTEMA ABERTO PARA COLETA DE URINA NÃO ESTÉRIL**Especificação Técnica:**

Tubo de PVC flexível azul (Tubo de drenagem).
Conector bucha (Retentor de gotejamento no reservatório).
Conector macho e fêmea em PVC azul (fixação do preservativo no tubo extensor).
Preservativo Látex (coleta de urina peniana).
Corta fluxo tipo Clamp PP Polipropileno (obstrução de coleta da urina).
Alça Plástica PVC azul (manipulação e fixação do dispositivo).
Garrafa de 1200 ml PP (Reservatório).

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto não estéril e de uso único; descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.
O prazo de validade do produto é indeterminado.
Contém látex natural. Pode causar alergia.
Utilizar o produto somente quando todos os componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho.
A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida.

Indicação de Uso:

É um artigo destinado a uso médico hospitalar para a coleta e armazenamento de urina.

Modo de Uso:

A escolha quanto ao uso dos dispositivos deve ser feita pelo médico;
Abrir embalagem;
Retirar o produto da embalagem;
Aplicar o preservativo no paciente;
Assim que o reservatório estiver cheio, esvazie ou substitua o produto.
Antes de esvaziar feche o tubo com o corta fluxo e proceda com o esvaziamento.
Para continuar utilizando o produto, abra o corta fluxo para que o líquido possa fluir normalmente.
Após o uso, descartar em lugar apropriado.

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570043.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
06/2016	00	Yurandy Zamora	Elaboração