

**PRENDEDOR UMBILICAL****Especificação Técnica:**

Plástico PEBD de cor branca.

Comprimento: 10cm de comprimento e 2 cm de largura.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

**Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

**Advertências e Precauções:**

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada e úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado.

**Indicação de Uso:**

É utilizado para fechar o cordão umbilical de recém-nascido, após o parto.

**Modo de Uso:**

Retirar o produto de sua embalagem no momento do uso;

Colocar o cordão umbilical na posição central do prendedor deixando distante 2 cm aproximadamente do recém-nascido e fechar até travar;

Cortar o cordão umbilical 1 cm acima do prendedor e certificar que não ocorre sangramento pelo cordão;

Após o período de uso descartar.

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163570015.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

<b>Data</b>	<b>Revisão</b>	<b>Responsável</b>	<b>Alterações</b>
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".