

10315002 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENT. AR, CON. LUER SLIP
ANVISA N°80163570006

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalp que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.


COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Ponta perfurante confeccionada conforme NBR ISO 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada, com filtro particulado de 15 micras.
5. Tubo em PVC atóxico com luz interna superior a 2.7mm.
6. Pinça com rolete para controle do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
7. Conector luer slip conforme NBR ISO 594-1/2003 montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
8. Protetor para a porta agulha (Tampa Luer Slip)
9. FREE LATEX

ROTULAGEM: Modelo de Rotulo

EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: (43) 3512-2800 sac@medsonda.com.br RESP. TÉCNICA: REGIANE GAVLAK CRO - PR 08201294 www.medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRODUTO COMPOSTO DE PVC - POLICLORETO DE VINILA; - COMPRIMENTO MÍNIMO 1.500MM; - LIVRE DE PIROGÊNICO E TOXINAS; - ATÓXICO; - FABRICADO CONFORME ABNT ISO 8536-4:2011; 20 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1+0,1ml OU MASSA DE 1+0,1g.	INSTRUÇÕES DE USO - ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR - FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL - COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER, CONICIDADE 6%; - ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASEPTICA; - FECHAR O REGULADOR DE FLUXO; - RETRAIR A TAMPA PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; - MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUZIR MEDICAÇÃO; - REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS - PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO; - EQUIPOS PRODUZIDOS EM PVC COM DOP NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO INCLUIRIL.	CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.
VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br	
MODELOS COMERCIALIZADOS 10315232 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER ROTATIVO 10315202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SLIP 10315202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10315202 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SLIP 10317001 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROT. 10317002 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SLIP	
Validade 4 anos após a data de fabricação	

COD: 10315002 – EQUIPO MACRO FLEX. FILTRO
PART. ENT. AR, CONEC. LUER SLIP
LOTE.OP: 00000 FAB/ ESTERIL: 00/00/00
ANVISA N° 80163570006

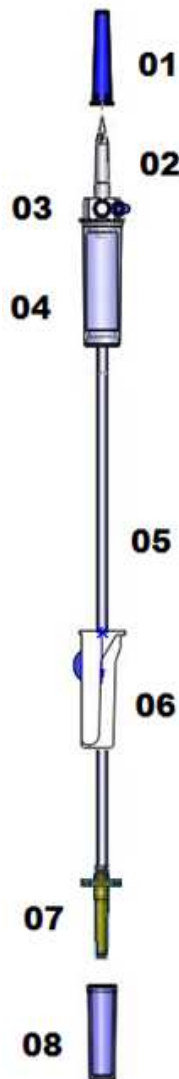

EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
09/2015	00	Yurandy Dominguez	Elaboração
03/2017	01	Joelma C. Brizola	Rotulo 4 anos
01/2018	02	Joelma C. Brizola	Revisão da embalagem
08/2018	03	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex