


**10317001 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PART. ENT. AR E INJ.
LAT. VALVULADO, CON. LUER ROT.
ANVISA Nº 80163570006**

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpels que se adaptem em conectores padrão 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Filtro de Ar Hidrofóbico de 0,22 µm.
4. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
5. Filtro Particulado de 15 µm.
6. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm e diâmetro externo de 4,00 mm.
7. Pinça com rolete para a regulação do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulação.
8. Injetor Lateral valvulado dotado de sistema needle free (livre de agulha) para administração de soluções em procedimento.
9. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com diâmetro interno de 3,20 mm e diâmetro externo 4,00 mm.
10. Conector luer lock rotativo com conicidade 6% conforme NBR ISO 594-1 e 2: 2003 para seringas e agulhas.
11. Tampa protetora para o conector Luer Lock Rotativo.
12. FREE LÁTEX

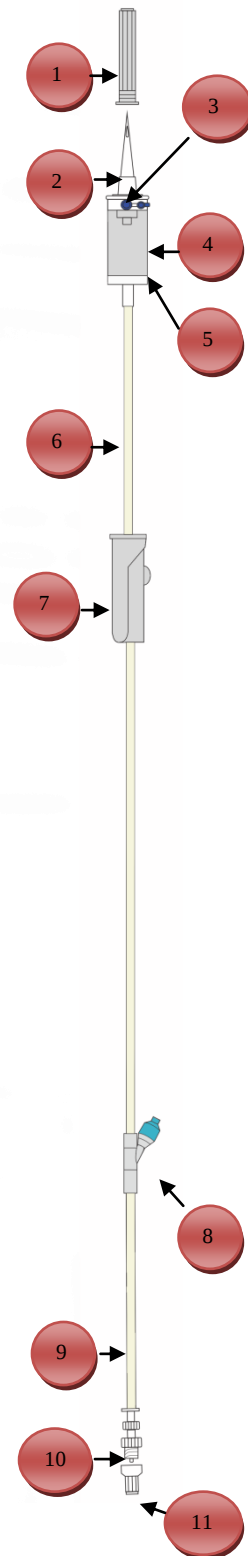

ROTULAGEM: Modelo de Rótulo

EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84.990-000 ARAPOTI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: (43) 3512-2800 sac@medsonda.com.br RESP. TÉCNICA: REGIANE GAVILAN CRQ - PR 09201284 www.medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRODUTO COMPOSTO DE PVC - POLICLORETO DE VINILA - COMPRIMENTO MÁXIMO 1,30M - LIVRE DE PIROGÊNICOS E TOXINAS - ATÓXICO - FABRICADO CONFORME ABNT NBR 8536-4: 2011 - 20 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA BEMIDAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1+0,10 OU MASSA DE 1+0,10g	INSTRUÇÕES DE USO 1- ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR 2- FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL 3- COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6% 4- ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASÉPTICA 5- FECHAR O REGULADOR DE FLUXO 6- RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO PRATO DE SOLUÇÃO 7- MODELOS COM INJETOR LATERAL PODEM SER UTILIZADOS PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO 8- REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE - UTILIZAR SOMENTE DE TUBOS DE COMPONENTES ÍNTEGRAMENTE CONTRIBUIDOS - PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO, USO ÚNICO - EQUIPO PRODUZIDO EM PVC COM OPÇÃO NÃO DEVER SER UTILIZADO COM MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM EM SUA FORMULAÇÃO POLÍDIOLIS	VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE	MODELOS COMERCIALIZADOS 10315002 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER ROTATIVO 10315002 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SUP 10315002 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP 10315002 - EQUIPO MACRO FLEXÍVEL FILTRO PARTICULADO INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP 10317001 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROT. 10317002 - EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SUP
Saúde Compulsório	USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR STERILE EQ MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE Validade 4 anos após a data de fabricação

**COD: 10317001 – EQUIPO MACRO FLEX. INF. GRAV.
FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT VALV. E CON. LUER ROT.
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00
ANVISA Nº 80163570006**



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
04/2017	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex
08/2019	02	Milena C. Rivera	Item 8. Alteração da palavra auto-cicatrizante para auto-vedante
08/2020	03	Milena C. Rivera	Item 3 Inclusão de 0,22 µm. Item 5 Alteração de 15 micras para 15 µm. Item 6 e 9 Alteração da palavra "luz interna superior a 2.7 mm para "diâmetro interno 3,20 mm e diâmetro externo 4,00 mm" Item 8 Alteração da palavra "com membrana auto-vedante" para "dotado de sistema needle free (livre de agulha)".