


10318002 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL INFUSÃO GRAVITACIONAL FILTRO PARTÍCULAS, ENTR.AR, INJETOR LATERAL VALVULADO E CON. LUER ROTATIVO
ANVISA N°80163570006

FINALIDADE:

Tem a finalidade de administrar infusão de soluções parenterais. Deve assegurar a compatibilidade de uso com recipientes de soluções parenterais, cateteres e scalpels que se adaptem em conectores de conicidade 6% conf. NBR 594:2003 1 e 2.

COMPOSIÇÃO:

1. Tampa protetora para a ponta perfurante.
2. Perfurador confeccionado conforme NBR 8536-4:2011 adaptável em bolsas e frascos de soluções a serem administradas.
3. Entrada de ar com filtro hidrofóbico.
4. Conector micro para redução do tamanho da gota.
5. Câmara de gotejamento em PVC flexível transparente para o monitoramento da solução administrada.
6. Filtro particulado de 15 micras.
7. Tubo em PVC atóxico com 130 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
8. Pinça com rolete para a regulagem do fluxo de gotejamento, rolete com estrias para atrito e auxílio na regulagem.
9. Injetor lateral valvulado, com membrana auto-cicatrizante para administração de soluções durante procedimento.
10. Tubo em PVC atóxico com 20 cm de comprimento com luz interna superior a 2.7 mm.
11. Conector luer lock rotativo, conforme NBR ISO 594-1 e 2/2003, montagem cônica com conicidade de 6% (luer) para seringas e agulhas.
12. Tampa protetora para a conector luer rotativo.
13. FREE LÁTEX

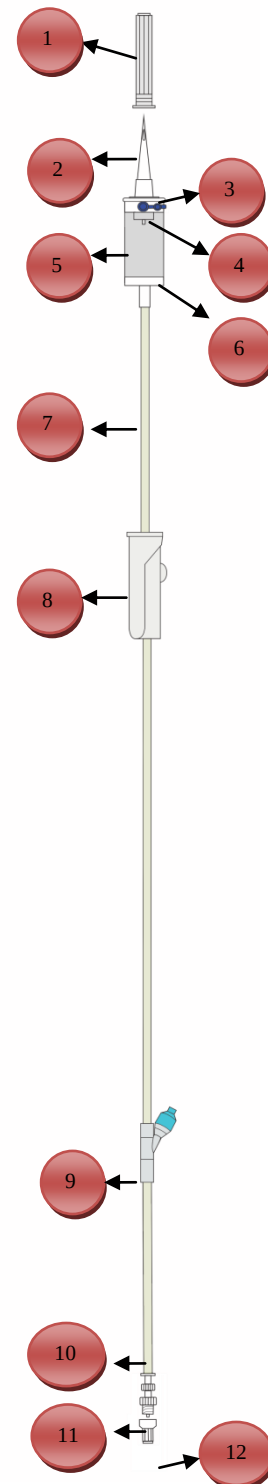

ROTULAGEM: Modelode Rotulo

EQUIPO MICROGOTAS PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL	
MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LTDA. AV. THEREZA DE SOUZA CARNEIRO, Nº 1191 DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 84.990-000 ARAPODI - PR CNPJ: 05.150.338/0001-43 IE: 9026874405 FONE: 43 3512 2800 sac@medsonda.com.br	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESTE PRODUTO É INDICADO SOMENTE PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL. - ESTE PRODUTO É LÍQUIDO E DE USO ÚNICO. - PRODUTO DESTINADO SOMENTE PARA USO ÚNICO. - FABRICADO EM PVC COM 100MM. - ATÓXICO. - ESTE PRODUTO É FABRICADO CONFORME NBR 8536-4:2011. - 40 GOTAS DE ÁGUA DESTILADA LIBERADAS PELO GOTEJADOR SÃO EQUIVALENTES A UM VOLUME DE 1 ML (100 GOTAS DE 100 ML).	INSTRUÇÕES DE USO 1- ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR 2- FINALIDADE: ADMINISTRAR SOLUÇÕES PARENTERAIS POR INFUSÃO GRAVITACIONAL, QUE NECESSITE DE MAIOR PRECISÃO VOLUMÉTRICA; 3- COMPATÍVEL COM CONECTORES LUER, CONICIDADE 6%; 4- ABRIR A EMBALAGEM DE FORMA ASEPTICA; 5- FECHAR O REGULADOR DE FLUXO; 6- RETIRAR A TAMPÃO PROTETORA DA PONTA PERFURANTE E CONECTAR AO FRASCO DE SOLUÇÃO; 7- MODELOS COM INJETOR LATERAL PODE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR MEDICAÇÃO; 8- REGULAR O FLUXO PRESCRITO, INICIANDO O GOTEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES - UTILIZAR SOMENTE SE A EMBALAGEM ESTIVER ÍNTEGRA E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. - UTILIZAR SOMENTE SE TODOS OS COMPONENTES ESTIVEREM INTEGRALMENTE CONSTITUÍDOS. - PRODUTO DESCARTÁVEL, DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO. USO ÚNICO. - EQUIPOS PRODUTOS EM PVC COM DOPNÃO DEVEM SER UTILIZADOS COM MEDICAMENTOS QUE CONTERNAM EM SUAS FORMAS DE 100 ML.	VER INSTRUÇÕES DE USO www.medsonda.com.br
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO MANTER EM LOCAL SECO, LIMPO E TEMPERATURA AMBIENTE.	MODELOS COMERCIALIZADOS 1032209 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP 1032210 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS E CONECTOR LUER SUP 1032212 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS COM ENTRADA DE AR E CONECTOR LUER SUP 1031701 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL E CONECTOR LUER SUP 1031702 - EQUIPO MICRO FLEXÍVEL FILTRO DE PARTÍCULAS ENTRADA DE AR INJETOR LATERAL CONECTOR LUER ROTATIVO 1031802 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROTATIVO 1031803 - EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV. FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER SUP
Saúde Compulsório	USO ÚNICO NÃO REESTERILIZAR PROIBIDO REPROCESSAR STERILE MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE Validade 4 anos após a data de fabricação

COD: 10318002 – EQUIPO MICRO FLEX. INF. GRAV.
FIL. PART. ENT. AR INJ. LAT. VALV. CON. LUER ROT.
LOTE.OP: 00000 FAB/ESTÉRIL: 00/00/00
ANVISA N° 80163570006



EMBALAGEM:

Embalado individualmente em papel grau cirúrgico para abertura asséptica.

ESTERILIZAÇÃO:

Produto esterilizado em Oxido de Etileno.

VALIDADE:

Validade 4 anos.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
04/2017	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
08/2018	01	Joelma C. Brizola	Inclusão free látex