

**PINÇA DE CHERON****Especificação Técnica:**

Poliestireno.

Comprimento: 25 cm.

Estéril: Esterilizado a Óxido de Etileno.

**Condições de Armazenamento e Transporte:**

Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

**Advertências e Precauções:**

Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada, perfurada ou úmida;

O produto é descartável e de reprocessamento proibido, não podendo ser reutilizado;

Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade;

**Indicação de Uso:**

É indicado para auxiliar na assepsia nos exames ginecológicos, bem na assepsia vaginal, como nos curativos no colo uterino.

**Modo de Uso:**

Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica durante o manuseio;

O procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;

Sob visão direta, mãos enluvadas, espéculo introduzido e aberto na vagina, com gaze ou algodão preso.

Pressão na extremidade serrilhada e embebida com solução de medicamentos ou antissépticos, com movimentos circulares ou de vai e vem.

Excursionar a pinça de Cheron sobre a mucosa a ser tratada.

Descartar depois de terminado o proceder.

**Fabricante:** Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

**Endereço:** Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

**Responsável Técnico:** REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

**Registro Anvisa:** 80163579007.

**CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:**

Data	Revisão	Responsável	Alterações
08/2015	00	Yurandy Zamora	Elaboração
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de "Joelma Cristina Brizola" para "Milena Costa Rivera".