

 MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE	Revisão nº01	INSTRUÇÃO DE USO – FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL IU 5.035	Emissão: 10/2019	 MEDSONDA PRODUTOS PARA SAÚDE
--	-------------------------	---	-----------------------------	---

FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

Especificação Técnica:

Frasco de Nutrição Enteral 300 ml – Graduação de 100 em 100 ml em auto-relevo.

Frasco de Nutrição Enteral 500 ml – Graduação de 100 em 100 ml em auto-relevo.

Confeccionado em Polietileno de Baixa Densidade (PEBD).

Condições de Armazenamento e Transporte:

Manter em local seco, protegido do sol e em temperatura ambiente.

Advertências e Precauções:

Produto não estéril e de uso único; descartável após uso e de reprocessamento proibido, não pode ser reutilizado.

Somente utilizar o produto se estiver íntegro e dentro do prazo de validade;

Não utilizar o produto se o lacre da tampa estiver rompido;

A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar danificada ou úmida.

Indicação de Uso:

Os frascos de nutrição enteral são artigos médico hospitalares destinados ao acondicionamento de nutrição enteral para ser administrado por sonda ou via oral.

Modo de Uso:

- O produto deve ser aplicado e supervisionado por um profissional da saúde, conhecedor das técnicas para este tipo de produto;
- Retirar o produto da embalagem;
- Retirar a tampa do frasco;
- Colocar a dieta a ser administrada;
- Fechar bem o frasco;
- Conectar o equipo na tampa do frasco;

Fabricante: Medsonda Indústria e Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Endereço: Av. Tereza de Sousa Carneiros nº1191 CEP 84.990-000.

Tel.(43) 3512-2800.

Responsável Técnico: REGIANE GAVLAK CRQ-PR 09201294.

Registro Anvisa: 80163570036.

CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Data	Revisão	Responsável	Alterações
10/2016	00	Joelma C. Brizola	Elaboração
10/2019	01	Milena Costa Rivera	Alteração do nome do Coordenador da Qualidade de “Joelma Cristina Brizola” para “Milena Costa Rivera”.